

Пошаговая инструкция по обработке контактных линз раствором Ever Clean:

1. Вымойте руки и вытрите чистым полотенцем.
2. Откройте линзодержатель и положите вашу левую линзу на его выпуклую часть, маркированную буквой «L». Закройте эту часть линзодержателя, стараясь не защемить линзу.
3. Повторите процедуру с вашей правой линзой, используя для этого другую половину линзодержателя, маркированную буквой «R».
4. Положите в контейнер одну таблетку. Наполните контейнер раствором Ever Clean до отметки. **Не переливайте и не наливайте ниже отметки!**
5. Вставьте линзодержатель в контейнер и плотно закройте.
6. Встряхните контейнер.
7. Поставьте контейнер прямо.
8. Линзы должны **оставаться в растворе** как минимум **2 ч или всю ночь для нейтрализации** перекиси водорода. На завершение реакции нейтрализации укажет желтовато-зеленый цвет раствора.
9. Выньте линзы из контейнера.
10. Ваши линзы готовы к надеванию.
11. Вылейте использованный раствор, сполосните контейнер и линзодержатель стерильным солевым раствором. **Не используйте водопроводную воду! Оставьте контейнер сушиться.**
12. Если вы не намерены надевать свои линзы сразу после дезинфекции, то можете хранить их в нейтрализованном растворе Ever Clean в закрытом контейнере до 48 ч.